RESMED

Guide de mise en place

Avant de mettre votre masque, enlevez le support orange de l'armature de l'entourage situé à l'arrière de votre masque et conservez-le pour une utilisation ultérieure.



 Détachez les deux clips inférieurs du harnais et placez le masque en position inclinée sur l'arête du nez.



 Tout en maintenant la partie supérieure du masque en place, faites pivoter la partie inférieure contre le visage.



 Maintenez le masque fermement sur le visage et faites passer le harnais par-dessus la tête.



 Placez les sangles inférieures sous les oreilles et fixez le harnais à la partie inférieure de l'entourage flexible.



 Défaites les bandes Velcro®, tirez uniformément sur les sangles supérieures du harnais sans trop les serrer, jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, tout en étant confortables, puis rattachez les bandes Velcro.



 Répétez l'étape 5 pour les sangles inférieures du harnais.



- Raccordez une extrémité du circuit respiratoire à la pièce pivotante et l'autre extrémité à l'appareil.
- Mettez l'appareil en marche.

Astuce 1



Assurez-vous que le harnais est correctement

positionné sur le sommet de la tête.

Astuce 2





 Assurez-vous que le masque repose bien sur le milieu de l'arête nasale et n'est pas placé trop près des yeux.

Quattro[™] FX
MASQUE FACIAL

www.quattrofx.com

Fabricant: ResMed Ltd, 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153, Australie. Distribué par: ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego CA 92123, États-Unis. ResMed (UK) Ltd, 96 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire 0X14 4RY, Royaume-Uni. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Quattro est une marque commerciale de ResMed Ltd et Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V. © 2010 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1014267/1 2010-09