

Plus petit, plus léger.
L'innovation au service de la liberté.



L'alternative aux masques faciaux traditionnels. Aujourd'hui, vous avez le choix en matière de traitement par masque facial.

Les avantages pour vous ...

3 étapes simples : définition de la taille, mise en place avec un simple mouvement de pivot et ajustement.

Quattro FX vous offre tous les outils pour un ajustement idéal du masque sur vos patients – dès la première utilisation et tout au long du traitement. Grâce au gabarit ainsi qu'à la technique de mise en place par mouvement de pivot, définissez la taille et ajustez facilement le masque ... un gain de temps, une réduction des coûts et une optimisation du nombre de visites par patient.

Un gain de temps et une réduction des coûts

Avec son système associant la bulle Spring Air™ et une armature de l'entourage, plus besoin de support frontal. Avec un point d'ajustement en moins, mettez le Quattro FX en place simplement et rapidement.

Plus grande acceptation du traitement

Le confort, la facilité d'adaptation et la sensation de liberté que procure le Quattro FX aideront les patients à mieux accepter et poursuivre le traitement ... lors de la titration et ensuite.

... et vos patients

Qualité et performance

Les nouvelles technologies utilisées pour la bulle Spring Air et l'armature de l'entourage offrent une ergonomie permettant de se passer d'un support frontal traditionnel. Quattro FX est un masque facial peu encombrant qui vous offre à la fois qualité et performance.

Liberté

La zone de contact avec le visage est réduite, dans le but de limiter les risques d'irritation cutanée ; le champ de vision est élargi pour une meilleure acceptation physique et psychologique du traitement par masque facial.

Une bonne nuit de sommeil

La bulle Spring Air dernière génération fournit une pression uniforme et absorbe le plus petit mouvement du patient pour qu'il puisse profiter d'une bonne nuit de sommeil, sans craindre pour l'étanchéité du masque.



Quattro™ FX
MASQUE FACIAL



Technologie

3 étapes simples

Définition de la taille, mise en place avec un simple mouvement de pivot et ajustement, sont les étapes pour utiliser le Quattro FX avec facilité et rapidité.

Le gabarit permet de déterminer facilement et avec précision la taille du masque.

Une fois la taille choisie, le masque est également très facile à ajuster, grâce à la technique **du pivot et ajustement** :

- 1 Placez tout d'abord la bulle en position inclinée sur l'arête nasale...
- 2 ... puis **faites pivoter** la moitié inférieure du masque contre le visage pour le **fixer**.

Quattro FX : bien ajusté et étanche, dès la première utilisation.

Un champ de vision élargi

et une sensation de liberté accrue grâce à un masque facial posé au milieu de l'arête nasale ; un entourage plus petit permet au patient de dormir confortablement sur le côté.

Les orifices de ventilation intégrés

dispersent l'air en silence et en douceur.

L'armature de l'entourage, flexible et résistante,

est assez rigide pour maintenir le masque contre le visage mais aussi suffisamment souple pour amortir les mouvements du patient pendant son sommeil.

Grâce à sa capacité de rotation à 360°,

le coude permet un positionnement adapté au circuit.

La pièce pivotante

permet de facilement raccorder et détacher le circuit respiratoire.

Le harnais plus confortable,

doté de sangles profilées en couronne qui épousent le dessus de la tête et dégagent la zone sensible de la nuque.



La bulle Spring Air à double jupe fournit une pression uniforme en douceur.

Les clips de harnais Set and forget sont faciles à prendre en main pour attacher et détacher le harnais et permettent de conserver les réglages du harnais.

La membrane profilée de la bulle autour de la zone sensible de l'arête nasale s'adapte à la peau et se remplit d'air pour reposer délicatement sur le nez.

Codes produit

Small	61703
Médium	61704
Large	61705

Quattro™ FX
MASQUE FACIAL

www.quattrofx.com

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA - [CEI/REP] ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK - ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Quattro et Spring Air sont des marques commerciales de ResMed Ltd, et Spring Air est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales.
Quattro™ FX - Indications : Masque facial destiné à acheminer au patient de façon non invasive le débit d'air produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients adultes à qui une pression positive a été prescrite. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier. **Dispositif médical de classe :** IIa **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123. **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. **Remboursement :** Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameil.fr © 2013 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1014245/2 2013-03