



Masque facial Ultra Mirage™

MISE EN PLACE

Choisir la bonne taille de masque

- Le bon gabarit est le plus petit reposant le plus près possible des coins externes de la bouche.
- Le gabarit doit reposer dans le creux du menton sous la lèvre inférieure. Le haut du gabarit doit reposer juste en dessous des sourcils. Cette position indique la bonne taille d'entourage rigide.
- Si l'arête du nez passe sous la ligne en pointillés du gabarit, utilisez une bulle *Shallow*. Si elle se trouve au-dessus de la ligne en pointillés, utilisez une bulle *Standard*.

Mise en place du masque

- Mettez la languette du support frontal dans la position la plus haute (position 4).
- Détachez le clip inférieur du harnais.




1

- Mettez le masque sur votre visage et passez le harnais par-dessus votre tête.
- Veillez à ce que les sangles supérieures reposent sur votre front et à ce que les sangles inférieures passent sous vos oreilles.
- Fixez à nouveau le clip du harnais à l'entourage rigide.



2

- Serrez légèrement les sangles supérieures et inférieures du harnais. Les tampons du support frontal devraient reposer légèrement sur votre front. Ne serrez pas trop les sangles.

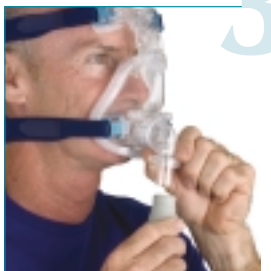

3

- Raccordez une extrémité du circuit respiratoire à la pièce pivotante du masque et l'autre extrémité à l'appareil.
- Mettez l'appareil en marche.
- Si de l'air s'échappe au niveau de la bulle, vous devrez peut-être changer la languette du support frontal de position.



4

- Desserrez les sangles supérieures du harnais et abaissez la languette du support frontal jusqu'à la position suivante (position 3).
- Serrez légèrement les sangles supérieures du harnais.
- Testez les quatre positions disponibles pour la languette du support frontal et réglez les sangles du harnais afin d'obtenir un ajustement à la fois fiable et confortable.

Masque facial

Ultra
MIRAGE™