

**ResMed**

**AirFit™** N10

Masque nasal


## Conseils de mise en place du masque AirFit™ N10

Alliant simplicité et confort, le masque nasal AirFit N10 est conçu pour faciliter la vie de vos patients. Son entourage discret se positionne sous les yeux, offrant un champ de vision totalement dégagé.



## Choix de la taille

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le gabarit du masque AirFit N10 comme guide.

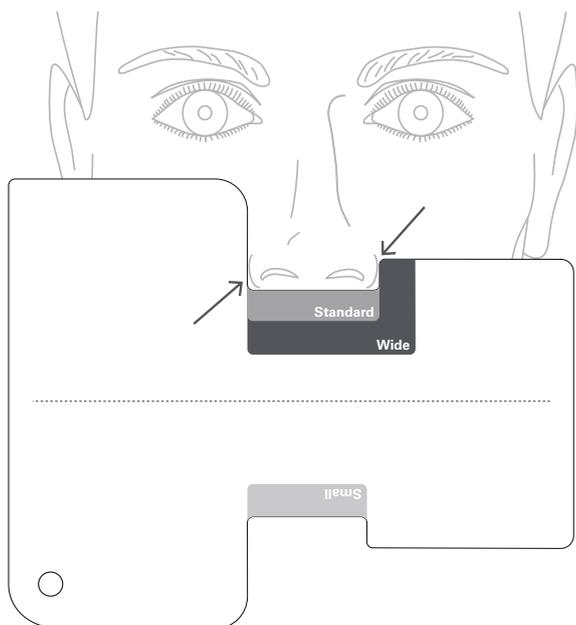

## 3 tailles de bulles disponibles

Le masque AirFit N10 est disponible en 3 tailles : Small, Standard et Wide.



La bulle taille Standard convient à la plupart des hommes, mais certains préféreront avoir une bulle taille Small ou Wide.

La bulle taille Small convient à la majorité des femmes.

## Conseils pour obtenir une bonne étanchéité

L'étanchéité se crée lorsque la bulle se gonfle. **Faites attention à ne pas trop serrer le masque.**




- Les sangles supérieures doivent être ajustées en premier afin d'obtenir une étanchéité stable et un bon confort. Il n'est pas nécessaire de trop serrer ces sangles.
- Les sangles inférieures fournissent la stabilité au masque et ne requièrent qu'une faible tension.

## Positionnement de la bulle

La bulle du masque AirFit N10 se positionne plus bas que la bulle du Mirage FX.

Cela permet d'offrir au patient un champ de vision totalement dégagé. Prenez soin de bien gonfler la bulle du masque AirFit N10 afin de répartir son poids de façon égale autour du nez.

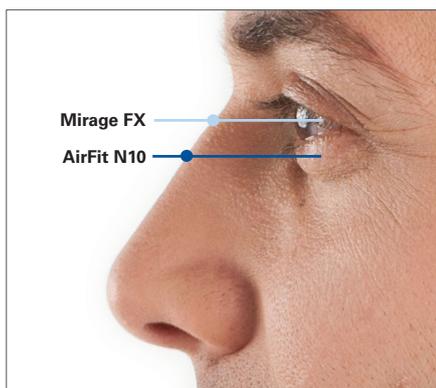

## Positionnement du harnais

Le harnais du masque AirFit N10 est disponible en taille Standard et Small. Dans les 2 cas, **il est important de positionner le harnais au-dessus de la nuque.**



## Conseils d'ajustement

Si les réglages précédents ne suffisent pas à obtenir une bonne étanchéité et une position confortable, le patient peut suivre les 4 étapes suivantes :



1. Avec le masque sur le visage et la machine en marche, dessérez les sangles inférieures puis faites de même avec les sangles supérieures. Repositionnez la bulle si besoin.
2. Assurez-vous que le harnais soit bien positionné avec la sangle au-dessus de la nuque.
3. Réajustez les sangles supérieures jusqu'à ce que les fuites au niveau des yeux aient disparu.
4. Enfin, ressérez les sangles inférieures, afin d'obtenir une bonne stabilité du masque.

## Mise en place du masque AirFit N10



- Assurez-vous que les logos ResMed et AirFit ainsi que la couleur grise soient tournés vers l'extérieur.
- Détachez les sangles inférieures. Alignez le bas de la bulle avec la partie inférieure de votre nez.



- Placez la bulle sur votre nez.
- Maintenez le masque sur votre visage.
- Faites passer le harnais par-dessus votre tête, en le tirant vers l'arrière de votre crâne.



- Passez les sangles inférieures sous vos oreilles et attachez les clips EasyClick sur les côtés de l'entourage.



- Détachez les bandes Velcro® des sangles supérieures du harnais.
- Ajustez les sangles uniformément jusqu'à ce que le masque soit confortablement ajusté, puis rattachez les bandes adhésives.



- Détachez les bandes Velcro® des sangles inférieures du harnais. Ajustez les sangles uniformément jusqu'à ce que le masque soit stable puis rattachez les bandes Velcro®.
- Connectez l'extrémité du circuit de votre masque au circuit respiratoire de votre appareil.



- Mettez votre appareil en marche afin qu'il insuffle de l'air.
- Ajustez la bulle et le harnais jusqu'à ce que le masque soit confortable sans être écrasé ou déformé.
- Votre masque est maintenant prêt.

**ASTUCES :** Les sangles supérieures sont des éléments clés pour obtenir confort et étanchéité. Veillez à ne pas trop les serrer.

**ASTUCES :** Les sangles supérieures nécessitent un serrage minimal pour être confortables.

**Remarque :** Pour les instructions d'utilisation complètes, reportez-vous au guide d'utilisation.



### OPTIONS

- Ajustez la sangle inférieure du harnais au-dessus ou en-dessous de vos cheveux en fonction de votre coiffure.
- Des housses en tissu sont disponibles en option.