

Swift™ FX Nano - Guide d'ajustement



- Veillez à ce que le bas de l'ouverture du coussin s'aligne avec le bas de votre nez puis placez le masque sur votre nez.
- Tirez ensuite le harnais pardessus votre tête de manière à ce qu'il se trouve à mi-chemin entre les oreilles et les yeux.



- Ajustez d'abord la sangle supérieure en tirant la sangle à travers la boucle, une encoche à la fois, jusqu'à ce que le masque se place confortablement sur votre nez.
- Ne serrez pas trop fort.



- La sangle arrière doit reposer juste au-dessus des oreilles à l'arrière de la tête.
- Ajustez les deux attaches sur la sangle arrière en tissu en même temps.



- Positionnez la sangle arrière sur ou sous vos cheveux en fonction de votre coiffure.



- Ajustez le coussin nasal jusqu'à ce qu'il repose confortablement sur votre nez.
- Branchez l'extrémité libre du tuyau court au circuit respiratoire de votre appareil puis mettez-le en marche.



- Vérifiez l'absence de fuites et ajustez si nécessaire. Si des fuites d'air sont constatées, réajustez la sangle arrière avant de réajuster la sangle supérieure.
- Votre masque est maintenant prêt à l'emploi.

Swift™ FX Nano - Carte des composants

Ensemble harnais

(comprend le harnais en silicone, la sangle arrière grise et les housses souples grises)

62238




Coussins

62230 (standard)
62281 (wide)



Housses souples (grises)

61530 (2)

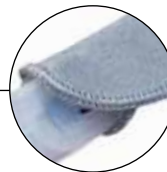

Ensemble tuyau court (gris)

(inclut le tuyau court, le coude et la pièce pivotante)

62236 (1)
62237 (10)



Codes produit

Masque Swift FX Nano* (standard)	62202
Masque Swift FX Nano* (wide)	62253

* Inclut le coussin (standard ou wide), l'ensemble tuyau court (gris) et l'ensemble harnais Swift FX Nano (gris).



Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez le **Guide d'utilisation du masque nasal Swift FX Nano**.