

F&P Brevida™



MASQUE NASAL À COUSSINS D'AIR

**Conçu pour inspirer
la confiance.
Optimise le confort.**

Gagner la confiance des patients est un élément essentiel à la réussite d'un traitement par PPC et la confiance des patients commence par un masque qui s'ajuste bien à leur morphologie tout en étant confortable.

NOUVEAU





Brevida™

Caractéristiques et avantages clés

Harnais réglable

Le harnais réglable est conçu pour maintenir le masque en position pendant le sommeil.

Jupe AirPillow™

La jupe AirPillow™ innovante se gonfle pour apporter une étanchéité efficace et confortable.




VisiBlue™

Les repères bleus intégrés aux principaux composants du masque facilitent l'utilisation quotidienne du masque par le patient.

Diffuseur lavable

Le diffuseur, qui réduit le bruit et le jet d'air, est lavable et durable.

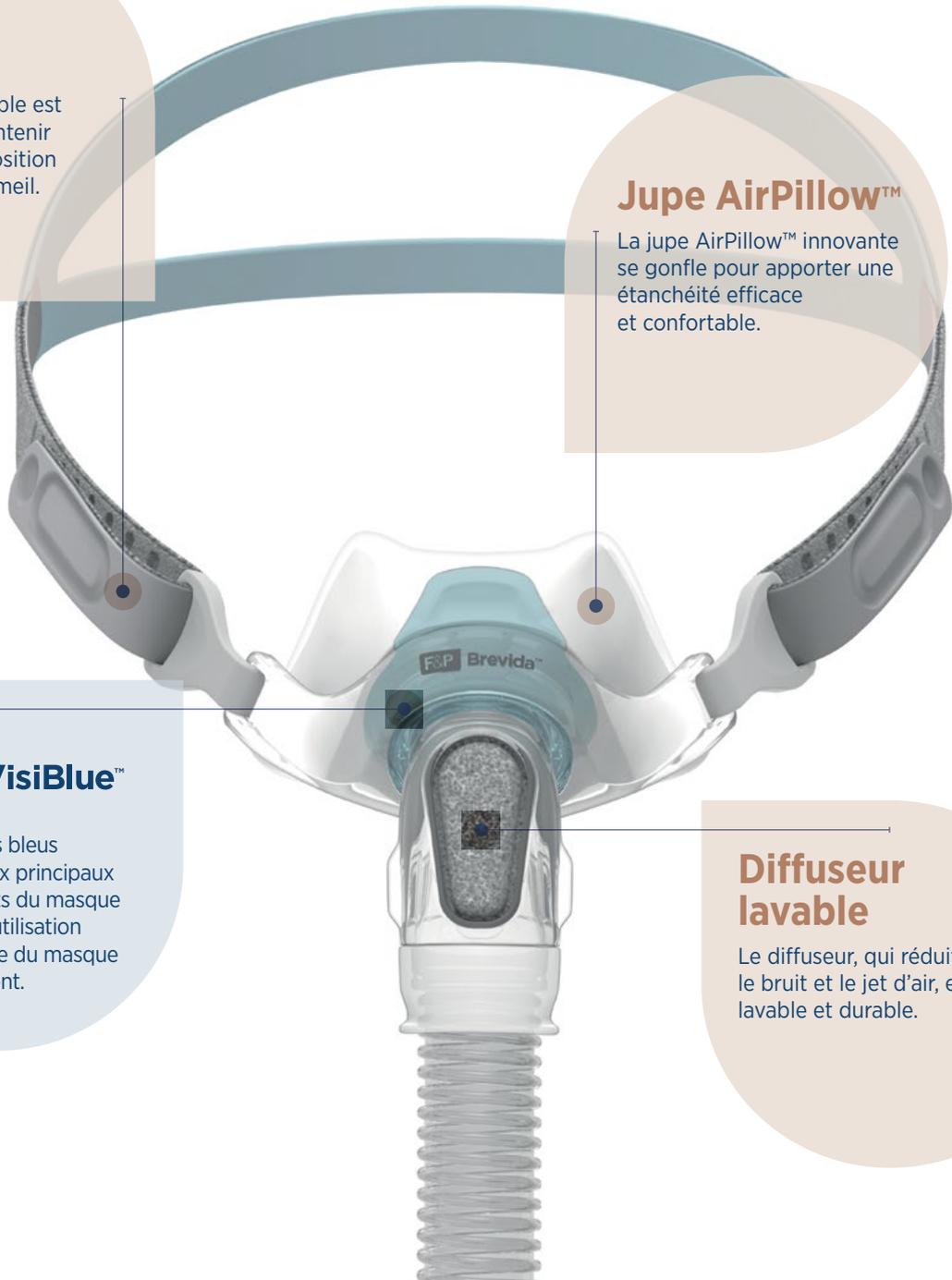

La jupe innovante AirPillow™ de F&P Brevida™

Deux tailles de jupe

XS-S (très petite-petite) et M-L (moyenne-grande)

Jupe souple et très fine

La jupe est fabriquée en silicone souple très fine (0,25 mm) pour offrir une étanchéité parfaite tout en douceur.

Coussins d'air polyvalents

La géométrie polyvalente des coussins d'air s'adapte à une large gamme de narines.

Supports latéraux stabilisateurs

Les supports latéraux permettent d'éviter que la jupe ne se détache pendant le sommeil.




Une jupe souple et douce

La jupe AirPillow™ se gonfle pour former un « coussin » doux, assurant une étanchéité dans les narines et autour du nez.


Jupe à coussins d'air F&P AirPillow™

Assure l'étanchéité
dans les narines et
autour du nez

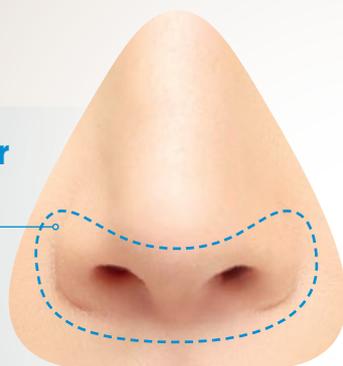

Jupe à coussins d'air traditionnelle

Assure l'étanchéité
directement dans les
narines

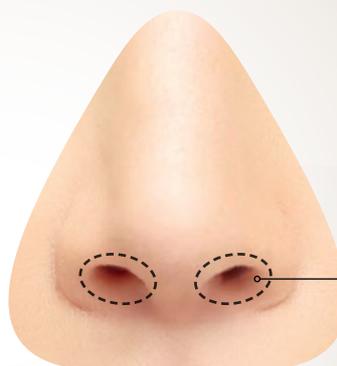

Mise en place de votre masque F&P Brevida™



01

Étape 1.
Tenir la jupe en silicone éloignée de votre nez, et avec les doigts, ouvrir soigneusement les supports latéraux souples de la jupe en silicone puis guider les deux ouvertures dans vos narines.



02

Étape 2.
Tenir la structure du masque d'une main, et de l'autre faire glisser le harnais au-dessus de la tête en plaçant les sangles au-dessus des oreilles, comme illustré sur l'image ci-dessus.



03

Étape 3.
Serrer ou desserrer doucement les sangles de part et d'autre du harnais jusqu'à obtenir une étanchéité confortable.

Classe du dispositif médical : Classe IIa - Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de cet appareil médical.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

RU **EC REP**

Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unité 16, Cordwallis Park
Clivmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, RU

RÉFÉRENCES DE COMMANDE POUR LES ZONES AMÉRIQUE DU NORD/ ASIE PACIFIQUE

MASQUES			
BREISA	Brevida Très petite-Petite (une jupe XS-S)	400BRE114	Jupe Brevida Moyenne-Grande (lot de 50)
BREIMA	Brevida Moyenne-Grande (une jupe M-L)	400BRE120	Harnais Brevida
BREISMA	Brevida XS-S et M-L (deux jupes)	400BRE151	Attaches du harnais Brevida (lot de 10)
		400BRE161	Diffuseur Brevida (lot de 10)
		400BRE171	Coude Brevida
PIÈCES DE RECHANGE		400FPH241	Raccord pivotant F&P 2
400BRE111	Jupe Brevida Très petite-Petite	400BRE131	Masque Brevida sans harnais, XS-S
400BRE112	Jupe Brevida, Moyenne-Grande	400BRE132	Masque Brevida sans harnais, M-L
400BRE113	Jupe Brevida Très petite-Petite (lot de 50)		

RÉFÉRENCES DE COMMANDE POUR LES ZONES EUROPE/AFRIQUE/ AMÉRIQUE DU SUD

MASQUES			
BREISU	Brevida Très petite-Petite (une jupe XS-S)	400BRE114	Jupe Brevida Moyenne-Grande (lot de 50)
BREIMU	Brevida Moyenne-Grande (une jupe M-L)	400BRE120	Harnais Brevida
BREISMU	Brevida XS-S et M-L (deux jupes)	400BRE151	Attaches du harnais Brevida (lot de 10)
		400BRE161	Diffuseur Brevida (lot de 10)
		400BRE171	Coude Brevida
PIÈCES DE RECHANGE		400FPH241	Raccord pivotant F&P 2
400BRE111	Jupe Brevida Très petite-Petite		
400BRE112	Jupe Brevida, Moyenne-Grande		
400BRE113	Jupe Brevida Très petite-Petite (lot de 50)		

DOMAINE D'UTILISATION Le masque nasal à coussins d'air F&P Brevida est destiné aux personnes dont le diagnostic médical nécessite un traitement par PPC ou par ventilation à deux niveaux de pression (VNDP).

Le masque nasal à coussins d'air F&P Brevida est conçu pour une utilisation à domicile pour un patient adulte unique (≤30 kg (66 lbs)) ou pour une utilisation multiple sur des patients adultes en milieu hospitalier ou dans

tout autre environnement clinique où il est possible de le désinfecter correctement entre chaque patient.